

PRODIGI DUO



FICHA TÉCNICA

Lupa TV a color compacta con Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), síntesis de voz para la lectura de los textos reconocidos y monitor de 20 pulgadas.

El dispositivo que actúa como cámara se puede desenchajar para utilizarlo como lupa electrónica manual con pantalla táctil de 5 pulgadas.

Puede capturar la imagen de un texto y pasarla a voz para facilitar su lectura y evitar el cansancio ocular. Para facilitar la comprensión de la síntesis de voz se dispone de dos tipos de voces a los que se puede cambiar la velocidad y el volumen. Las imágenes capturadas se pueden guardar.

La superficie de lectura es un marco estático en el que se realiza la captura que se puede ampliar hasta 80 veces y 20 veces en modo directo.

Dispone de buen contraste de los elementos.

La página Web se encuentra en inglés. El manual de usuario y la guía de instalación se encuentran en inglés y español.

El equipo completo pesa unos 16 Kg.

REQUISITOS

Capacidad visual para ver lo que se magnifica en pantalla.

Se debe usar una pantalla táctil.

USO

Permite lectura continuada de textos.

Se puede personalizar la configuración y apariencia de los textos, imágenes y síntesis de voz.

Permite conversión de imagen a voz.

BIBLIOGRAFÍA, MANUALES, RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS

- [Web de la Lupa TV Prodigí Duo de Humanware:](http://store.humanware.com/hus/prodigi-duo-2-in-1-electronic-magnifier-24-in.html)
<http://store.humanware.com/hus/prodigi-duo-2-in-1-electronic-magnifier-24-in.html>
- [Manual de usuario:](ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/ProdigiDuo_Manual.docx)
ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/ProdigiDuo_Manual.docx
- [Guía de inicio rápido:](ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/ProdigiDuo_Guia.docx)
ftp://ftp.once.es/pub/utt/biblioteca/Manuales/ProdigiDuo_Guia.docx
- [CIDAT:](http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=771&idseccion=04)
<http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=771&idseccion=04>

[Lupas TV](#)